



## **Seznam metod s referenčními mezemi a preanalytickými doporučeními je k dispozici na Intranetu FN**

### **( Laboratoře, Seznam metod OKB ).**

- (1) Nesrážlivá krev (heparinizovaná kapilára BH LABOR, kat. č. 101120). Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry vložit drátek, kapiláru uzavřít a pomocí magnetu krev promíchat. Okamžitý transport do laboratoře v chlazeném boxu nebo v ledové lázni. Součástí vyšetření bude i vápník ionizovaný.
- (2) Nesrážlivá krev (Li-heparin, SARDEDT kat.č. 05.1147.020). Po odběru okamžitě odstranit vzduchové bubliny, stříkačku pevně uzavřít zátkou nebo speciálním uzávěrem a pomalým nakláněním stříkačky krev promíchat. Okamžitý transport do laboratoře v chlazeném boxu nebo v ledové lázni. Součástí vyšetření bude i vápník ionizovaný.
- (3) Nesrážlivá krev (Li-heparin, SARDEDT kat.č. 05.1147.020 nebo Radiometer 1,5 ml, kat.č. 956-522). Po odběru okamžitě odstranit vzduchové bubliny, stříkačku pevně uzavřít zátkou nebo speciálním uzávěrem a pomalým nakláněním stříkačky krev promíchat. Okamžitý transport do laboratoře v chlazeném boxu nebo v ledové lázni. Součástí vyšetření bude i vápník ionizovaný.
- (4) Telefonicky objednat na tel. č. 543 183 179, požadavek na formuláři NIS-žádanka o vyšetření/ošetření.
- (5) Určeno pouze pro stanovení diagnózy diabetes mellitus. Nesrážlivá krev, K-EDTA+NaF, okamžitý transport do laboratoře, SARSTEDT kat.č. 04.1918. Musí být odebrána plná zkumavka a ihned po odběru dobře promíchána jemným otáčením.
- (6) Nesrážlivá krev, K-EDTA+NaF, okamžitý transport do laboratoře v ledové lázni, SARSTEDT kat. č. 04.1918. Musí být odebrána plná zkumavka a ihned po odběru dobře promíchána jemným otáčením.
- (7) U pacientů 15-18 let je nutné pro výpočet GF zadat výšku.
- (8) Nesrážlivá krev (Li-heparin - gel), okamžitý transport do laboratoře v ledové lázni. Musí být odebrána plná zkumavka.
- (9) Musí být odebrána plná zkumavka.
- (10) Nesrážlivá krev (Li-heparin, Sarstedt, kat. č. 05.1147.020). Uzavřít, promíchat, okamžitý transport do laboratoře v chlazeném boxu nebo v ledové lázni. Lze provést samostatně nebo je součástí ABR.
- (11) Vyšetření lze provést pouze u hospitalizovaných pacientů.
- (12) Nesrážlivá krev, K-EDTA, SARSTEDT, kat. č. 05.1167.
- (13) Základní vyšetření likvoru zahrnuje: vzhled, celkové bílkoviny, elementy.
- (14) S likvorem dodat současně i srážlivou krev.
- (15) Telefonicky objednat na tel. č. 543 183 179, požadavek na formuláři NIS-žádanka o vyšetření/ošetření. Bude provedeno vyšetření moče chemicky i morfologicky.
- (16) Dodat současně krev a vzorek moče po promíchání nasbíraného množství. Uvést celkové množství moče (s přesností na 10 ml), dobu sběru, tělesnou hmotnost a výšku pacienta.
- (17) Dodat současně krev a vzorek moče po promíchání nasbíraného množství. Uvést celkové množství moče (s přesností na 10 ml), dobu sběru, tělesnou hmotnost a výšku pacienta. Budou provedena tato vyšetření: glukóza v plazmě a vyšetření močoviny, kreatininu, Na, K současně v plazmě i v moči.

